

Välineen käyttö

1.

### Esidesinfektio ja pesu

**Erisan Oxy+**  
5% 15min  
tai  
**Erisan Des 2%** 30min

Laita likaiset välineet suoraan liuokseen. Jos vielä desinfiointiajan jälkeen on näkyvää likaa, harjaa välineet tässä samassa liuoksessa.

4.

Kuivaa, tarkasta ja varastoi. Pidä käyttökunnossa nivelöljyllä, puhdistuskumilla tai Steelillä

## VÄLINEHUOLTO

2.

Huuhtele välineet hyvin juoksevalla vedellä ja kuivaa ne.

3.

### Steriloi kuumailmasterilaattorissa TAI Tee High level -desinfektio aineella

Kuumailmasterilointi  
180 C 1 tunti.

High level -desinfektio  
-Erisan OXY+ 5% 30 min  
tai  
-Descoton, ei laimenneta, 45 min